

	NUMUNE TRANSFER TALİMATI			
BL.TL.04	17.01.2020	Rev00	Revizyon Tarihi	1/1

1.AMAÇ: Bu talimatın amacı örnek alımı kurallara uygun olarak alınan numunenin transferinin standart bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

2.KAPSAM: Bu talimat numune transfer faaliyetlerini kapsar.

3.SORUMLULAR:

Numune taşıyan personel

Laboratuvar sekreteri

Biyokimya laboratuvarı numune kabul birim teknisyeni

4.UYGULAMA

Numunenin alım noktasından en uygun şekilde merkezi laboratuvar numune kabul sekreterliğine ulaşması ve laboratuvar da laboratuvar otomasyon sistemine kaydedilmesi işlemidir.

1. Servislerden veya acilden gönderilen numuneler uygun şekilde pnömotik taşıma sistemi ile merkezi laboratuvar kabul birimine gönderilir veya uygun taşıma çantaları içinde servis veya acil personeli tarafından merkezi laboratuvar kabul birimine getirilir. Laboratuvar kabul biriminde LİS (Probel) sisteminde AUTOMATE) barkodu okutularak (numune kabul saati) sisteme aktarılır. Numuneler otomatik olarak cihazda, acil birimi için öncelikli olarak diğer numuneler de laboratuvar birimlerine göre ayırma tabi tutulur.
2. Kan gazı testi için uygun taşıma çantasında gelen kan örneğini getiren personel tarafından laboratuvar numune kabul sekreterliğine teslim edilir. Biyokimya laboratuvarı kan kabul personeli tarafından barkodu manuel okutularak biyokimya laboratuvarına kabulü yapılır ve en hızlı bir şekilde laboratuvar teknisyenine teslim edilerek çalışılır.
3. Flow sitometri testi için gelen kanlar bu testi çalışan laboratuvar teknisyenine elden teslim edilir ve laboratuvar kabulü o testin sorumlu teknisyeni tarafından bizzat yapılır.
4. İdrar tetkiki için laboratuvar kabul birimine başvuran hastalara, laboratuvar kabul sekreteri tarafından barkodlu idrar kabı verilerek aynı kattaki hasta tuvaletlerine yönlendirir. Çocuklardan idrar örneği için idrar torbası veya idrar kapları laboratuvar sekreteri tarafından aileye verilip örnek toplanması hakkında hastaya bilgi verilir ve topladıkları örnekleri ilgili laboratuvar sekreterliğine en kısa sürede getirmeleri istenir. Barkodlu idrar kabını dolu olarak getiren hastalara numunelerini belirlenen alana bırakması için yol gösterilir. Laboratuvar kabul sekreterliğinde LİS (Probel) sisteminde barkodu okutularak idrar numune kabul saati sisteme aktarılır. Biyokimya idrar laboratuvarı teknisyeni en geç 15 dakikada bir sekreterliğe gelerek idrar örneklerini idrar laboratuvarına taşır ve analizi yapar.
5. Özellikle numuneler (24 saatlik idrar testleri ve glikoz tolerans testi gibi) için hastaya tıbbi sekreter tarafından bilgi verilir. Poliklinik hastalarından istenen oral Glikoz tolerans testi için glikoz içirilmesi laboratuvar sekreterlerinin gözetiminde laboratuvar girişinde yapılır. OGTT sürecinde 2.ci numuneler, saati geldiğinde kan alma biriminde öncelikli olarak alınır. Gerektiğinde biyokimya sorumlu asistanına yönlendirir.
6. Hem kan alma biriminde hem de acil ve yataklı servislerde biyolojik numune alma ve numunelerin transfer işlemleri; numune alma ve transferi talimatı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.