

1.1.Cihazın Kullanımı:

- 1.1.1. Anjio cihazında kumanda odasındaki cihaz ana konsol üzerinde bulunan Power (yeşil) tuşuna basılarak cihaz açılır.
- 1.1.2. Makine odasındaki klimalar yetişkin anjiyoda 24C°, çocuk anjiyoda kış mevsiminde 22 C°, yaz mevsiminde 20 C° sıcaklığına ayarlanır.
- 1.1.3. Klavye üzerindeki tuşlarla hasta bilgileri (adı, soyadı, doğum tarihi ve dosya numarası) sisteme girilir.
- 1.1.4. Üzerinde “Masa” işareti olan tuşla masa indirilip, kaldırılarak istenilen mesafe ayarlanır.
- 1.1.5. C kolunun masaya yaklaşip uzaklaşması için gerekli düğmelere basılır.
- 1.1.6. Tüpün çekim sırasında standart koroner anjiyografi poz açıları manuel ayarlanır.
- 1.1.7. İşlem sonrası C kolu hastanın üzerinden uzaklaştırılıp standart pozisyona alınır.
- 1.1.8. anjio cihazında kumanda odasında buluna ana bilgisayardan “Exit” tuşuna basılarak(gri tuş) cihaz kapatılır.

1.2.Dikkat Edilecek Hususlar:

- 1.2.1. Anjiyo işlemi sırasında ortama fazla radyasyon saçılmaması için hareketli kolimatörün mümkün olduğunca hastaya odaklanması sağlanmalıdır. Kolimatör hastadan uzaklaştığında tekrarlar gerekeceğinden ortama daha fazla radyasyon yayılabilir.
- 1.2.2. Anjiyomat ile alınacak görüntülerde venöz veya arteriyel bölgelere göre anjiyo matın basıncı ve radyoopak miktarı dikkatli ayarlanır.
- 1.2.3. Anjiyo için gelen bayan hastaların hamilelik durumu ya da şüphesi var ise işlem için hastanın altına ve üstüne kurşun önlük ile bariyer konulur.
- 1.2.4. Her sabah anjiyografi cihazı açılarak çalışır durumda olduğu kontrol edilir. Cihazda herhangi bir arıza durumunda biyomedikal birimine haber verilmelidir.
- 1.2.5. Cihazın sistem odasının klimaları yetkili firmanın önerdiği şartlarda açık tutulmalıdır.
- 1.2.6. İşlem yapılacak hastaların kaydı (adı-soyadı, doğum tarihi ve hasta numarası) doğru bir şekilde sisteme girilmelidir.
- 1.2.7. İşlem bitiminde hastaların görüntüleri PACS sistemine gönderilmelidir.
- 1.2.8. Hasta mahremiyeti göz önünde bulundurularak hasta hazırlığı sırasında ve işlem esnasında salonda görevliler haricinde kimse bulunmamalıdır.
- 1.2.9. Hastanın kilosunun cihazın kaldırma şartlarında olmasına dikkat edilmelidir.

1.3.Cihazın Bakımı:

Cihazın temizlik ve bakımları teknisyen tarafından “Anjiyo Ünitesi Temizlik Planı”na göre yapılır ve “Anjiyo Ünitesi Temizlik Takip Formu”na kaydedilir.