

1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, plazma şoklama cihazının etkin ve doğru kullanımını standart bir hale getirmektir.

2.KAPSAM: Bu talimat plazma şoklama kullanım ve bakım faaliyetlerini kapsar.

3.SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından kan merkezi sorumlu teknisyeni sorumludur.

4.UYGULAMA

4.1 Plazma şoklama cihazının açma-kapama düğmesi "ON" konumuna getirilir.

4.2 Cihaz kullanımından en az 2 saat önce açılmalıdır.

4.3. Ekranda hata mesajı çıkarsa hemen sorumlu teknisyen aranır.

5.Kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlar

5.1 Cihazın bulunduğu oda ısısı 20-25 derece olmalıdır.

5.2 Cihaz -40 derecede kullanıma hazır hale gelmektedir.

5.3 5.3 .Cihaz plazma konduktan sonra 3 saat içinde açılmamalıdır.Ürün içindeyken kapağı açılıp kapanmamalıdır.

5.4Cihazın işi bitince kapatılıp kapağı açık bırakılarak defrost yapması sağlanır.

6. Cihaz temizliği ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar.

6.1 Cihaz temizlenirken yumuşak bir bez kullanılır ve bez sabunlu solusyonla hafifçe nemlendirilir.

6.2 Cihazın temizliğinde alkol veya diğer kuvvetli çözücüler kullanılmamalıdır.

7.Arıza Halinde Yapılacaklar;

7.1 Cihaz fişten çıkarılır.

7.2 Derhal "Arıza Talimatı" doğrultusunda Teknik Servise haber verilir.

8.İLGİLİ DOKÜMANLAR:

Plazma Şoklama cihazı kullanım kılavuzu