

 MANİSA CELALBAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFA SULTAN HASTANESİ		PLAZMA STOK DOLABI KULLANIM VE BAKIM TALİMATI		 KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ	
TH.TL.08	09.06.2017	Revizyon No	Revizyon tarihi	1/1	

1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, plazma stok dolabının etkin ve doğru kullanımını standart bir hale getirmektir.

2. KAPSAM: Bu talimat plazma stok dolabı kullanım ve bakım faaliyetlerini kapsar.

3. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından kan merkezi sorumlu teknisyeni sorumludur.

4. UYGULAMA

4.1 Plazma stok dolabının, açma-kapama düğmesi "ON" konumuna getirilir.

4.2 Ekranda hata mesajı çıkarsa hemen sorumlu teknisyen aranır.

5.Kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlar

5.1 Cihazın bulunduğu oda ısısı 20-25 derece olmalıdır.

5.2 Cihaz -80 derecede çalışmalıdır.

5.3.Cihaz kapağı açık kaldığında ve -80 derece dışında sesli alarmla uyarmalıdır.

6.Cihaz temizliği ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar.

6.1 Cihaz temizlenirken yumuşak bir bez kullanılır ve bez sabunlu solusyonla hafifçe nemlendirilir.

6.2 Cihazın temizliğinde alkol veya diğer kuvvetli çözücüler kullanılmamalıdır.

6.3 Cihazın filtresi haftada bir temizlenir.

6.4 Cihazın ayda bir karlanması temizlenir.

7. Arıza Halinde Yapılacaklar;

7.1 Cihaz fişten çıkarılır.

7.2 Derhal "Arıza Talimatı" doğrultusunda Teknik Servise haber verilir.

8.İLGİLİ DOKÜMANLAR:

Plazma stok dolabı kullanım kılavuzu