

|                                                                                                                                                        |                                                            |             |                 |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>MANİSA<br/>CELALBAYAR<br/>ÜNİVERSİTESİ</b><br>HAFA SULTAN HASTANESİ | <b>KAN ÇALKALAMA CİHAZI KULLANIM VE BAKIM<br/>TALİMATI</b> |             |                 | <br><b>TRANSFÜZYON MERKEZİ</b> |
| TH.TL.10                                                                                                                                               | 09.06.2017                                                 | Revizyon No | Revizyon tarihi | 1/1                                                                                                              |

**1.AMAÇ:**

Bu talimatın amacı, kan çalkalama cihazının etkin ve doğru kullanımını standart bir hale getirmektir.

**2.KAPSAM:**

Bu talimat kan çalkalama cihazının kullanım ve bakım faaliyetlerini kapsar.

**3.SORUMLULAR:**

Bu talimatın uygulanmasından kan merkezi sorumlu teknisyeni sorumludur.

**4.UYGULAMA:**

**4.1.**Cihazın açılması ,cihaz açma-kapama düğmesi "ON"konumuna getirilir.

**4.2.**Cihaz açılmıyorsa prize takılı olup olmadığı kontrol edilir.

**4.3.**Cihazı kapatırken off düğmesine basılır. Daha sonra gelen mesaj onaylanarak kapatılır.

**4.4.**Cihaz off düğmesine basılmadan fiş prizdeyken kapatılmamalıdır.

**4.5.**Ekranda hata mesajı çıkarsa hemen sorumlu teknisyen aranır.

**5.Kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlar**

**5.1.**Cihazın bulunduğu oda ısısı 20-25 derece olmalıdır.

**5.2.** Cihazın çalkalama alanı geniş olmalıdır.

**5.3.**Cihaz; üçlü torba alımlarında 470ml,tam kan tekli torba alımında 450ml ayarında olmalıdır.

**5.4.** Kanın yavaş çekimlerinde pıhtılaşmaması için zaman uyarısı olmalıdır.

**6.Arıza Halinde Yapılacaklar;**

Cihaz fişten çıkartılır.

Derhal "Arıza Talimatı" doğrultusunda Teknik Servise haber verilir.

**7.İLGİLİ DOKÜMANLAR:**

Kan çalkalama cihazı kullanım kılavuzu