

 MANİSA CELALBAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFA SULTAN HASTANESİ		SOĞUTMALI TORBA SANTRİFÜJ CİHAZI KULLANIM VE BAKIM TALİMATI		 KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ	
TH.TL.12	09.06.2017	Revizyon No	Revizyon tarihi	1/1	

1.AMAÇ:

Bu talimatın amacı soğutmalı torbalı santrifüj cihazının etkin ve doğru kullanımını standart bir hale getirmektir.

2.KAPSAM:

Bu talimat soğutmalı torbalı santrifüj cihazının kullanım ve bakım faaliyetlerini kapsar.

3.SORUMLULUKLAR:

Bu talimatın uygulanmasından transfüzyon merkezi sorumlu hekim ve teknisyeni sorumludur.

4.TALİMAT AKIŞI:

4.1.Cihazın Açılması

4.1.1.Cihaz kullanmadan bir saat önce açma kapama düğmesi ON konumuna getirilir.

4.1.2.Ekranda hata mesajı çıkarsa hemen sorumlu teknisyen aranır.

4.2.Kullanırken dikkat edilecek hususlar

4.2.1.Cihazın bulunduğu oda ısı 20-25 derece olmalıdır.

4.2.2.Cihaz 5 derecede ve 3500 devirde çalışmalıdır.

4.2.3.Cihaza torbalar karşılıklı ve dengeli konmalıdır.

4.3.Cihaz temizliği ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar

4.3.1.Cihaz temizlenirken yumuşak bir bez kullanılır bez sabunlu suyla hafif nemlendirilir

4.3.2.Cihaz temizliğinde alkol veya diğer kuvvetli çözücüler kullanılmamalıdır.

4.3.3.Cihaz soğutmalı olduğundan içindeki kazanda yoğunlaşmadan dolayı biriken su 15 günde bir temizlenmelidir.

4.4.Arıza halinde yapılacaklar.

4.4.1.Cihaz fişten çıkarılır.

4.4.2.Derhal "arıza talimatı" doğrultusunda teknik servise haber verilir.

4.4.3.Teknik servis dışında kimse cihazı tamir etmeye çalışamaz.

5.İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

5.1.Arıza talimatı