

 MANİSA CELALBAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFA SULTAN HASTANESİ	AFEREZ TOPLAMA CİHAZI KULLANIM VE BAKIM TALİMATI		 KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ	
TH.TL.13	09.06.2017	Revizyon No	Revizyon tarihi	1/1

1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, aferez toplama cihazının etkin ve doğru kullanımını standart bir hale getirmektir.

2. KAPSAM: Bu talimat aferez toplama cihazının kullanım ve bakım faaliyetlerini kapsar.

3. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından transfüzyon merkezi sorumlu hekim ve teknisyeni sorumludur.

4. UYGULAMA

4.1 Aferez toplama cihazının 1 tuşun basılarak açılır.

4.2 Ekranda hata mesajı çıkarsa hemen sorumlu teknisyen aranır.

4.3 Aferez setleri uygun şekilde yerleştirilir.

5.Kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlar

5.1 Cihazın bulunduğu oda ısısı 20-25 derece olmalıdır.

5.2 .Bozuk ve arızalı setler kullanılmamalıdır.

6.Cihaz temizliği ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar.

6.1 Cihaz temizlenirken yumuşak bir bez kullanılır ve bez sabunlu solusyonla hafifçe nemlendirilir.

6.2 Cihazın temizliğinde alkol veya diğer kuvvetli çözücüler kullanılmamalıdır.

7. Arıza Halinde Yapılacaklar;

7.1 Cihaz fişten çıkarılır.

7.2 Derhal “Arıza Talimatı” doğrultusunda Teknik Servise haber verilir.

8.İLGİLİ DOKÜMANLAR:

Aferez toplama cihazının kullanım kılavuzu