

 MANİSA CELALBAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFA SULTAN HASTANESİ	OTOMATİK PİPETLEME CİHAZI KULLANIM VE BAKIM TALİMATI		 KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ	
TH.TL.14	09.06.2017	Revizyon No	Revizyon tarihi	1/1

1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, otomatik pipetleme cihazının etkin ve doğru kullanımını standart bir hale getirmektir.

2.KAPSAM: Bu talimat , otomatik pipetleme cihazının kullanım ve bakım faaliyetlerini kapsar.

3.SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından transfüzyon merkezi sorumlu hekim ve teknisyeni sorumludur.

4.UYGULAMA

4.1 Cihazın bağlı olduğu PC açılır.

4.2 Otomatik pipetleme, cihazının açma-kapama düğmesi “ON”konumuna getirilir.

4.3. Ekranda hata mesajı çıkarsa hemen sorumlu teknisyen aranır.

5.Kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlar

5.1 Cihazın bulunduğu oda ısısı 20-25 derece olmalıdır.

5.2 Cihaz atık kabı ve solüsyonlar kontrol edilir.

5.3.Cihaza günlük bakım (final wasching) her gün yapılmalıdır.

5.4.Cihaz da çalışılacak örneklerin kanların pıhtılı olmadığı kontrol edilmelidir.

6. Cihaz temizliği ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar.

6.1 Cihaz temizlenirken yumuşak bir bez kullanılır ve bez sabunlu solusyonla

hafifçe nemlendirilir.

6.2 Cihazın temizliğinde alkol veya diğer kuvvetli çözücüler kullanılmamalıdır.

7.Arıza Halinde Yapılacaklar;

7.1 Cihaz fişten çıkarılır.

7.2 Derhal “Arıza Talimatı” doğrultusunda Teknik Servise haber verilir.

8.İLGİLİ DOKÜMANLAR:

8.1.Otomatik pipetleme cihazı kullanım kılavuzu