

 MANİSA CELALBAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFA SULTAN HASTANESİ		PLAZMA ERİTME CİHAZI KULLANIM VE BAKIM TALİMATI		 KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ	
TH.TL.15	09.06.2017	Revizyon No	Revizyon tarihi	1/1	

1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, plazma eritme cihazının etkin ve doğru kullanımını standart bir hale getirmektir.

2.KAPSAM: Bu talimat plazma eritme cihazının kullanım ve bakım faaliyetlerini kapsar.

3.SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından kan merkezi sorumlu teknisyeni sorumludur.

4.UYGULAMA

4.1 Plazma eritme cihazının açma-kapama düğmesi "ON" konumuna getirilir.

4.2 Ürünler eritilmek üzere uygun şekilde cihaza yerleştirilir ve starta basılır. İşlem bitti uyarısı gelince kapak açılır ve ürünler çıkartılır.

4.3. Ekranda hata mesajı çıkarsa hemen sorumlu teknisyen aranır.

5.Kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlar

5.1 Cihazın bulunduğu oda ısısı 20-25 derece olmalıdır.

5.2 Cihaza koyacağımız ürünler patlak veya kırılmış olmamalıdır.

5.3 .Plazma patlamışsa yumuşak bir bezle dezenfektan kullanarak temizlenir.

6. Cihaz temizliği ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar.

6.1 Cihaz dış kısmı temizlenirken yumuşak bir bez kullanılır ve bez sabunlu solusyonla hafifçe nemlendirilir.

6.2 Cihazın temizliğinde alkol veya diğer kuvvetli çözücüler kullanılmamalıdır.

7.Arıza Halinde Yapılacaklar;

7.1 Cihaz fişten çıkarılır.

7.2 Derhal "Arıza Talimatı" doğrultusunda Teknik Servise haber verilir.

8.İLGİLİ DOKÜMANLAR:

Plazma Eritme cihazı kullanım kılavuzu